

Topcase Universal - Montageanleitung

Bitte beachten Sie folgende Schritte bei der Anbringung des Topcases.

Lieferumfang:

- 1x Topcase
- 1x Grundplatte
- 1x Einlegematte
- 5x Schrauben
- 5x Muttern
- 5x Unterlegscheiben (Teller)
- 2x Metallschienen
- 2x Schlüssel



Schritt 1: Montage der Grundplatte

Montieren Sie die Grundplatte auf dem Gepäckträger Ihres Fahrzeuges.

Richten Sie die Grundplatte mittig auf dem Gepäckträger aus, so dass Sie die Bodenplatte, mit Hilfe von 4 Schrauben, 4 Muttern, 4 Unterlegscheiben und den 2 Metallschienen auf den Gepäckträger fixieren können (Bild 1-3).



Bild 1 - Gepäckträger



Bild 2 - fixierte Bodenplatte (oben)



Bild 3 - fixierte Bodenplatte (unten)

WICHTIG: Unter Umständen passen die vorgebohrten Löcher nicht mit den Löchern der Grundplatte überein. Bitte richten Sie die Grundplatte so aus, dass es wie in den Bildern 1-3 passt.

Topcase Universal - Montageanleitung

Schritt 2: Montage des Topcases

Führen Sie das Topcase in die Arretierung der Grundplatte ein. Nun sollte das hintere Loch von dem Topcase mit dem von der Grundplatte übereinstimmen. Anschließend können Sie die Halteschraube montieren (Bild 1-2).



Bild 4 – Innenansicht Topcase



Bild 5 – Bodenplatte und Topcase von unten

Zum Schluss legen Sie die mitgelieferte Gummimatte über die Löcher vom Topcase-Boden. Und schon haben Sie es geschafft!