

Topcase SC 22 - Montageanleitung

Bitte beachten Sie folgende Schritte bei der Anbringung des SC 22-Topcases. Das Topcase von Alpha Motors kann auf fast alle gängigen Roller Gepäckträger montiert werden.

Lieferumfang:

- 1x Topcase
- 1x Abdeckung für Montageplatte
- 1x Montageplatte
- 2x Klemmschienen
- 4x Schrauben
- 4x Muttern
- 4x Unterlegscheiben




Schritt 1: Topcase anlegen.

Die Schrauben (Gepäckträger) entfernen.



Schritt 2: Topcase befestigen.

Die Montageplatte auf den Gepäckträger legen. Die Unterlegscheiben in die angezeigten Lochungen des Gepäckträgers einsetzen und anschließend mit den Schrauben gleichmäßig festziehen.

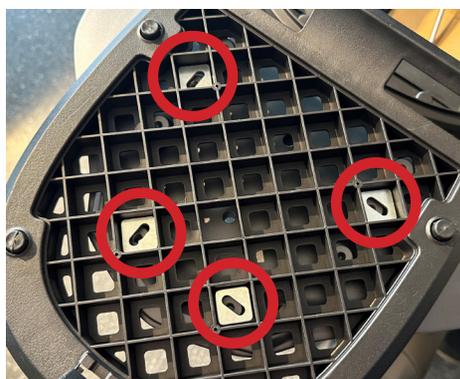

Topcase SC 22 - Montageanleitung



Schritt 3: Einlegematte.

Abschließend können Sie die Abdeckung auf der Montageplatte befestigen.
Sie haben erfolgreich das Universal Topcase 2 montiert!

Zum Abnehmen des Topcases den roten Knopf drücken.

